


Dental Cart Installation manual


1. Informations sur le produit

Nom du produit : Chariot dentaire
Modèle du produit : TC-6

2. Composition du chariot dentaire

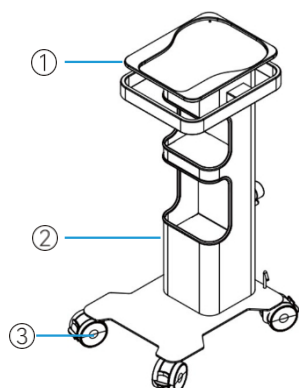

- ① Plaque supérieure ;
- ② Colonne ;
- ③ Plaque de fond.

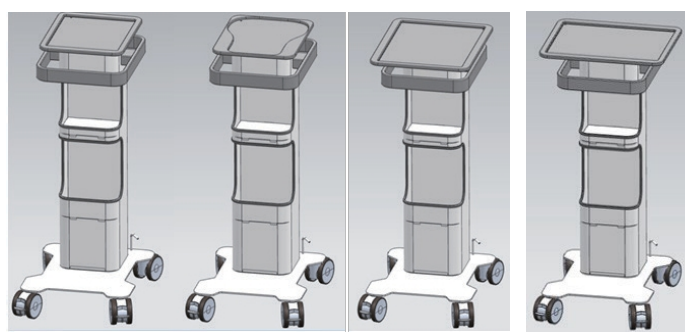


Type A
polyvalent

Type BT


Type ST

Type


3. Installation d'un petit chariot

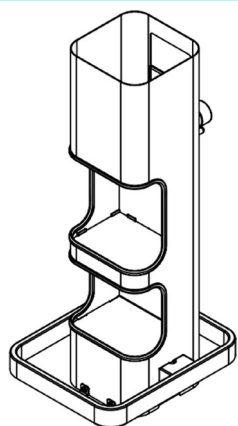


- Retirez la petite colonne du chariot et placez-la à l'envers.

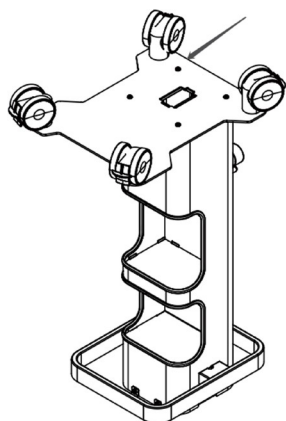


- Retirez la plaque inférieure et installez-la sur le pilier du chariot. Utiliser un tournevis pour serrer la vis du fond.

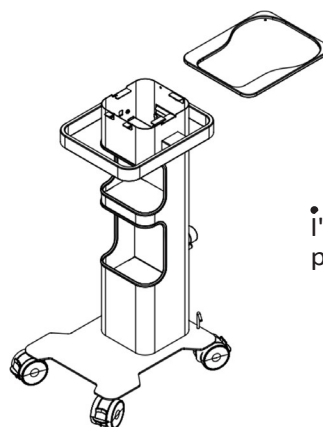

- Placez le chariot vers l'avant et installez le panneau supérieur.

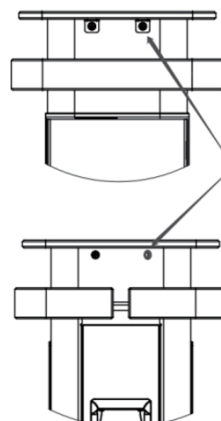

- Enclenchez le plateau supérieur et la colonne, et serrez les vis de fixation avant et arrière à l'aide d'un tournevis.

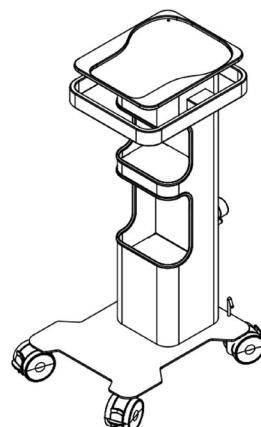

- Installation complète.

4. Conditions de stockage :

Les chariots dentaires doivent être stockés à l'intérieur, dans un environnement bien ventilé, à l'abri de l'humidité et de la corrosion.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

Tel:

Sales Dept.: 0773-5873196/ 2350599

After-sales Service Dept.: 0773-5827898/13978361362

Website: <http://www.glwoodpecker.com>

E-mail: woodpecker4@glwoodpecker.com